



# GLOW

# NFM

## Használati utasítás

GLOW UNLIMITED / 10

# GLOW *Unlimited* GLOW 10

<b>Képernyő méret:</b>	13.3"	10"
<b>Eszköz súlya:</b>	2kg	1.5kg
<b>Eszköz szélessége:</b>	330mm	260mm
<b>Eszköz magassága:</b>	110mm	110mm
<b>Készlet súlya:</b>	4kg	3.5kg

## Figyelmeztetés:

- Használat előtt olvassa el az instrukciókat
- Nem használható fel újra
- Megfelelően helyezze el
- Tisztítsa és fertőtlenítsa
- Használjon nedves törlőkendőt az összes munkaterület tisztításához
- Alkohol használata tilos!
- Használjon eldobható kesztyűket

## Besorolás:

- Az eszköz 1. osztályú
- Folyamatosan használható, hordozható
- Ne használja gyúlékony anyag közelében

## Tárolási és működtetési, környezeti feltételek:

- 10-40° Celsius fokos hőmérséklet
- 30%-75% relatív páratartalom
- 700-1060 hPa légköri nyomás

## Technikai adatok

- 110 g Kézi egység súlya

## Unit Power

- 12 Volt
- 1.5 A



Használat előtt  
olvassa át a használati  
utasításokat



BF alkalmazott  
részek



Az NPM International  
által készült



Ne dobja ki



Wi-Fi elérés

## Table of Contents:

Bevezetés.....	4	Saját tevékenységeim .....	16
GLOW Eszköz Készlet .....	5	Kapcsolataim .....	16
A kézi egység .....	6	Felhasználói profilok.....	17
A tük .....	6	Újdonságok.....	17
A kézi egység tartó.....	6	Képzés.....	18
A tük behelyezése a kézi egység .....	6	Gyakori kérdések .....	20
A hálózati adapter.....	7	Webshop .....	21
Hálózati adapter csatlakoztatása .....	7	Kapcsolat.....	21
Pedál kapcsoló .....	7	A 3 „Saját Fiókom” szekció .....	22
NPM Kézi egység működése .....	8	Saját készlet .....	22
Első beállítás .....	8	Partner kártyák .....	23
Gyors menü .....	9	Új partner hozzáadása .....	23
Eszköz kikapcsolása .....	9	Partner kártya áttekintése .....	23
Internetes portál billentyűzet.....	9	Időbeosztásom .....	24
Beállítások .....	10	Közösség.....	26
A GLOW eszközök verzió frissítése .....	10	Új téma létrehozása .....	27
Wi-Fi hálózat kiválasztása .....	11	Fényképek hozzáadása a galériához.....	28
Internetes funkciók .....	11	Videók feltöltése .....	28
Munkaképernyő .....	12	Hibajavítás.....	29
GLOW Internetes portál.....	13		
Profil beállítások .....	14		
Üzenetek .....	14		
Üzenetírás meglévő felhasználónak .....	15		
Üzenetírás az adminisztrátornak.....	15		
Üzenetküldési rendszer.....	15		

## Bevezetés

### *Kedves sminktetováó,*

Köszönjük, hogy csatlakoztál az NPM International családjához és köszönjük a cégünkbe vetett bizalmadat.

Az NPM International büszke arra, hogy a világ egyik vezető vállalata a Tartós Make-Up és Egészségügyi iparágakban.

Az évek során az NPM Internationalnál rengeteg tapasztalatot és ismeretet gyűjtöttünk össze, amelyek tükröződnek minden egyes eszközünkön és termékünkön, és ezzel a tudással sikerült egy ideális, kiváló minőségű felhasználói környezetet és csodálatos, innovatív termékeket létrehozni.

Vállalatként az a mottónk, hogy létrehozunk egy szebb, jobb világot mind a szépségipar, mind pedig az egészségügy területén.

A GLOW eszközök szériái a modern, csúcsmínőséget képviselik a Tartós Make-Up piacán és mindegyik GLOW modell önálló információs egységként működik, amely képes adatokat és tudást átadni minden ügyfélnek és felhasználónak a világ minden táján éjjel és nappal.

Az eszközök első pillantásra elegánsak és egyszerűnek tűnnek, de a nagy teljesítményű hardvernek köszönhetően tökéletes eredményeket nyújtanak és nagyon felhasználó barátok.

Kizárólag a GLOW felhasználói számára fejlesztettünk ki egy „Kapcsolat” funkciót, amely valós időben összeköt egy NPM igazolvánnyal rendelkező rendszergazdával, akivel azonnal kapcsolatba lehet lépni és aki elérhető bármikor a számodra, amikor valamilyen kérdésed, kérésed felmerül.

A GLOW élményed már akkor elkezdődik, amikor először megérinted a készüléket, amellyel a világ Tartós Makeup és Mikropigmentációs csapatához tudsz csatlakozni. A tudás és a tapasztalat kincsei várnak rád és a világ legjobb mestereitől tanulhatsz az adott területen.

Az NPM hisz abban, hogy minden művész, legyen az kezdő vagy szakember, megkaphassa a lehetőséget, hogy megossza tehetségét és munkáit a nagyvilággal a közösségi funkcióknak köszönhetően.

Rengeteg innovatív funkció van ezekben az eszközökben beépítve, úgyhogy ne feledd, itt az idő a ragyogásra, a GLOW-ra!

Elköteleztünk vagyunk abban, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk, hogy figyelemmel kísérjünk minden ügyfelet és mindig elérhetőek legyünk a számukra bármilyen kérdéssel is forduljanak hozzánk.

Sok szerencsét és eredményes munkát kívánok!

*Moshe Alul*

CEO

## GLOW Eszköz készlet:



GLOW sminktető gép



Hivatalos NPM kéziégység és tartó



NPM márkájú kéziégység tartó



Kéziégység csatlakozó kábel



NPM márkájú elegáns hordozótáska



Láb pedál




Hálózati adapter 12v

## Kézi egység:



## A Tűk:

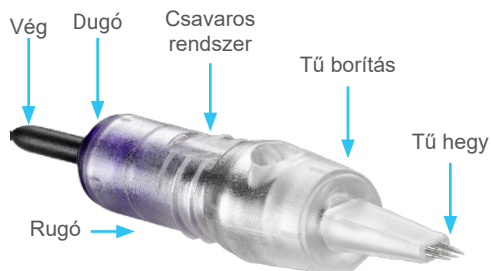

**Megjegyzés:** Mindig a kívánt hatás eléréséhez szükséges tű típust válasszuk ki.

## Kézi egység tartó:



A kezelés során a kézi egységet időnként félretesszük, így más szükséges műveleteket is el tudunk végezni. A kézi egység mindig erre az alapra kell helyezni, hogy biztosíthassuk és fenntarthatassuk a tisztaságát, az élességét és a minőségét.

## A tű behelyezése a Kézi egységbe:



Helyezze a tűt a kézi egység behelyező nyílásába, amíg az teljesen bele nem kerül a testbe.




Miután a tűt behelyezte, csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az teljesen be nem kattan a Kézi egységbe. A tű kivételéhez csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba.

## Hálózati adapter:



A GLOW készülék tápegysége 2 részből áll, amelyeket a képen látható módon kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa őket egymásba.

## A hálózati adapter csatlakoztatása a készülékbe:

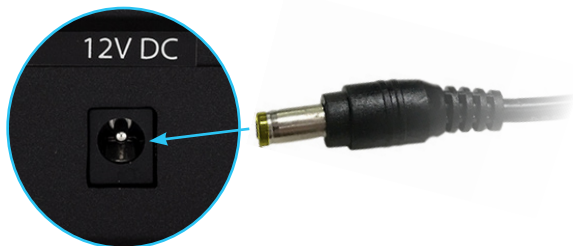

Dugja be a hálózati adaptert egy hálózati aljzatba, majd a GLOW 12V-os bemenetébe.

## A lábajtású pedál:




## Megjegyzés:

Néhány felszerelés megjelenése egy kicsit eltérő lehet, amely nagyban függ a megvásárolt GLOW modelltől és annak használhatóságától.

A felhasználói felület megjelenése és elrendezése is különböző lehet, a használatban lévő változat és annak fejlesztései miatt.

A felhasználói kézikönyvben látható összes kép csak bemutató célokat szolgál.

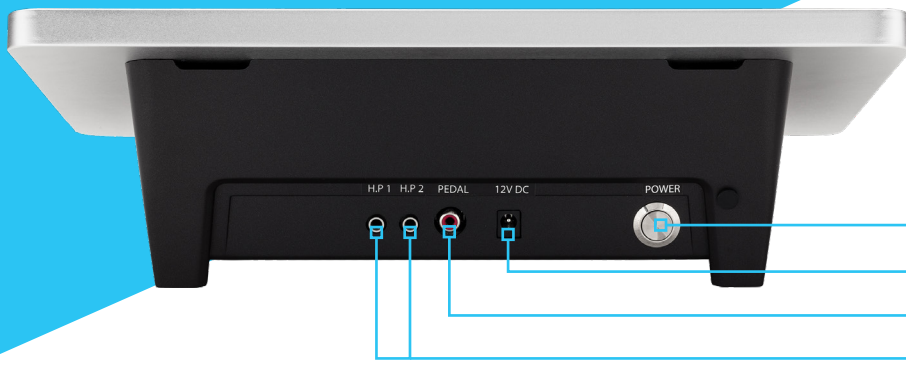

Megjegyzés: A feliratok a GLOW készülékek hátoldalán különbözőképpen jelenhetnek meg, de a funkciók azonosak.

BE/KI kapcsoló gomb

12V bemenet

Lábpedal bemenet

A & B kéziegység bemenet

### NPM kéziegység használata:

A Kéziegység két fő részből áll. A Kéziegység testéből és a „Csavarható fejéből”.

Ahhoz, hogy a Kéziegységet magához a készülékhez csatlakoztathassa a Kéziegység kábelét kell használnia. Csatlakoztassa a kábel egyik végét a Kéziegység végéhez, és a kábel másik végét pedig az eszköz hátoldalán található egyik bemeneti nyílásba, ahogy az az előző képeken látható.

### Hogyan csatlakoztassa a Tűket a Kéziegységbe?

Egyszerűen csak csavarja a tűt az óramutató járásával megegyező irányban a kéziegység „csavarható fejébe”, stabilan tartva a kéziegység alumínium csavarozható fejét, amíg az megfelelően nem kattant a helyére.

A tű berakásához és kivételéhez fordítsa el a kéziegység alumínium csavarozható fejét.

Az óramutató járásával megegyező irányú csavarozás: a tű többet mutat.

Az óramutató járásával ellentétes irányú csavarozás: a tű vissza kell helyezni a patronba.

\*Csak akkor állítsa be a csavarfejet, amikor a Kéziegység működésben van!

**MEGJEGYZÉS:** a tű hosszát akkor állítsd be, amikor a Kéziegység a te irányodba néz.

Annak érdekében, hogy a tű kivethető legyen a Kéziegéségből, fogjuk meg az alumínium csavarozható fejet és kezdjük el a tűpatront az óramutató járásával ellentétes irányba csavarni.

### Első beállítás:

Először is csatlakoztasd a tápegységet a készülék hátuljába (AC villamos csatlakozó).

Ezután csatlakoztasd a Kéziegységet a készülék hátoldalán található A & B bemeneti nyílásba. Válaszd ki a kívánt bemenetet a kettő közül.

Miután csatlakoztattad a Kéziegységet és a tápegység adapterét a GLOW eszközhöz, nyomd meg a Be- / Kikapcsoló gombot a készülék bal hátsó sarkában.





## Gyors menü

Ebben a menüpontban sokkal gyorsabban és hatékonyabban férhetsz hozzá a GLOW különböző részeihez.

1. Válassz ki egy kezelési parancsikont
2. Munkalap képernyői parancsikont
3. Fő menü parancsikont
4. Beállítások parancsikont
5. Eszköz kikapcsolása



### Sminktetőváló gép kikapcsolása:

A készülék kikapcsolásához kattints a „Gyorsmenü” menüpontban a kikapcsolás föltre a készülék bal felső sarkában.

Ezután nyomd meg a „kikapcsolás” gombot és kövesd a megadott instrukciókat.

Válasszuk le a Kézi egységet és a lábajtású kapcsolót a készülékről.

**FIGYELEM! NE KAPCSOLJA KI A GÉPET, MIELŐTT A „Kikapcsolás” GOMBBAL LE NEM ÁLLÍTJA A KÉSZÜLÉKET!**

### Webes portál gyorsbillentyűk.

Ebben a sávban láthatja

1. A Wi-Fi kapcsolat erősségét
2. A bejövő üzenetek elérhetőségét
3. Itt lehet látni az üzeneteket és az értesítéseket
4. Beállítani az állapotot és a felhasználói fiókot

## Beállítások:

A „Beállítások” gomb segítségével érhetők el a GLOW által felkínált különböző beállítások és optimalizálások.

The image shows a screenshot of the NFM International app's settings menu. The app's header includes the NFM International logo, a 'BACK' button, and status icons for Wi-Fi, Bluetooth, and notifications. The settings are organized into three columns:

- Language:** A dropdown menu currently set to 'English'.
- Light Selection:** A grid of 48 color swatches for background selection.
- Automatic Updates:** A toggle switch that is turned on, with a 'Check Update Now' button below it. The current version is listed as 'Version: 1.6.3-5 (v13)'.

Annotations with arrows point to these features:

- Top-left inset: Points to the 'Settings' button in the main app menu.
- Top-center: 'Válaszd ki a kedvenc színedet, ami a GLOW háttérzíne lesz' (Choose your favorite color, which will be the GLOW background color).
- Top-right: 'Manuálisan ellenőrizheted a rendszer frissítések új verzióit' (You can manually check for new system update versions).
- Far right: 'Állítsd be, hogy a rendszer automatikusan frissítsen, amikor elérhető új frissítéseket talál' (Set it so the system automatically updates when it finds new updates available).
- Left side: 'Válaszd ki nyelvet' (Choose language) points to the Language dropdown.
- Left side: 'Csatlakozz a wi-fi hálózathoz' (Connect to the wi-fi network) points to the WiFi toggle.
- Left side: 'Némítsd / Hangosítsd a rendszer hangjait' (Mute / Unmute the system sounds) points to the Sound toggle.
- Left side: 'Kapcsold be / ki a LED fényt a GLOW eszköz alján' (Turn on / off the LED light on the GLOW device) points to the Light toggle.

## Glow frissítése:

Annak érdekében, hogy meggyőződhess arról, hogy a GLOW rendszer legfrissebb verzióját használod és, hogy frissítsd a készüléket a következő beállításokra lesz szükséged a menüben > csatlakozz egy Wi-Fi hálózathoz (győződj meg arról, hogy a Wi-Fi kapcsolatod erős és stabil!) > nyomd meg a „Frissítések ellenőrzése” gombot. Amennyiben

van elérhető, új frissítés az eszköz automatikusan elkezdheti letölteni azt.

**NE KAPCSOLD KI A KÉSZÜLÉKET A FRISSÍTÉS IDEJE ALATT.**

Miután sikeresen feltelepítette a frissítéseket, a rendszer egy üzenetet fog küldeni, hogy a frissítés sikeres volt.

Kapcsold ki a készüléket a frissítés telepítése után és kapcsold be újra.

## Wi-Fi hálózat kiválasztása:

### Select network:

- WiFi Network 1 ✓ 
- WiFi Network 2 
- WiFi Network 3 
- WiFi Network 4 

Close

A felugró listából válassz ki azt a hálózatot, amihez kapcsolódni szeretnél. (Az elmentett kapcsolódást zöld pipa jellel fogja megjelölni a rendszer.)

Gépelj be a jelszót a felugró billentyűzetről és nyomj meg az OK-t.

(Ha a Wi-Fi hálózat jelszó nélkül kapcsolódik, hagyj üresen a jelszó mezőjét.)

### Connecting to: WiFi Network 2

Enter your password



OK

Close

Csatlakozás: WiFi hálózat 2

Miután nyomtunk egy OK-t a WiFi be fog töltődni. A betöltés jelzését a képernyő jobb felső sarkában követhetjük nyomon. Miután az eszköz csatlakozott a hálózathoz a betöltési jelzést egy zöld színű wifi szimbólum fogja felváltani.

## Webes funkciók:




A következő funkciók csak wi-fi hálózathoz való csatlakozás után érhetők el.

(Bolt, Kapcsolatok, Gyakori kérdések, Közösség, Képzések, Személyes fiók, Üzenetek, Bejövő üzenetek, Megjegyzések a bejövő üzenetknél és Felhasználói beállítások képernyő)



A „Munka indítása” funkció a GLOW eszközön a kezelés megkezdésének a módja. Miután megnyomod a „Munka indítása” gombot, a kívánt, következő kezelések opció képernyőjére leszel átirányítva:

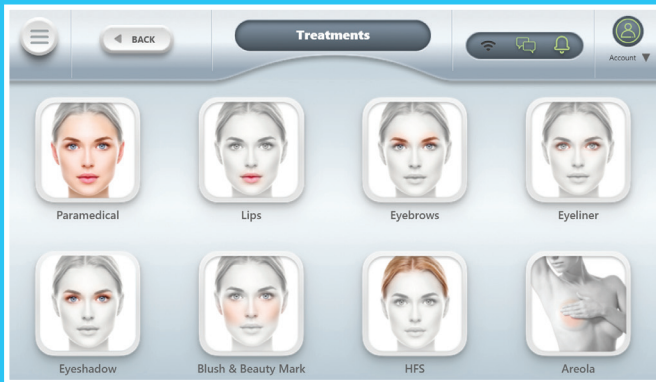



A kezelési lehetőségek képernyőjén válaszd ki a végrehajtani kívánt kezelés típusát. Miután kiválasztottad, egy másik képernyőre irányít át a rendszer. Az új képernyőn, válaszd ki a végrehajtani kívánt hatást / technikát.

## Irány az üzleti élet: Üdvözlünk a Munka képernyődön:



1. A tű sebességét (RPM) a + / - gombok nyomva tartásával módosíthatod vagy a sebességjelző gomb húzogatásával.
2. A kiválasztott kezelés + hatás.
3. Gombok, amelyekkel a két különböző Kézi egység bemenete között lehet választani.
4. Csúsztasd jobbra / balra.
5. Ajánlott tűk a kiválasztott kezelés + hatás létrehozásához. A tű megnyomásával további információk jelennek meg a kijelzőn a választott tűt illetően.
6. Manuális indítása / leállítása a Kézi egységnek.

**TIPP: Ne felejtse el, hogy az eszköz a lábhajtású pedál használatát is támogatja. Csak csatlakoztassa a Lábhajtású pedál bemenetbe a Lábhajtású pedált és kezdje el dolgozni.**

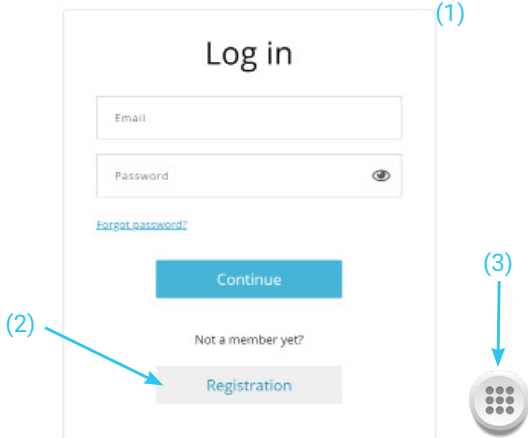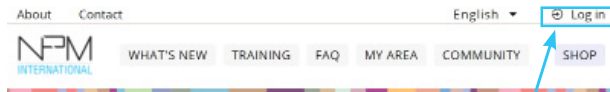


## GLOW webes felület

Üdvözlünk a GLOW webes felületén,

Ez a Te területed, ahol megoszthatsz, tanulhatsz, felfedezhetsz és kapcsolatba kerülhetsz más GLOW felhasználókkal a világ bármely részéről.

Mielőtt először elkezded felfedezni a felületet, javasoljuk, hogy olvasd el a használati utasítást és feltételeket a GLOW webes portálján.


Annak érdekében, hogy a GLOW webes portált teljes egészében felfedezhesd és megtapasztalhassd, létre kell hoznod egy saját fiókot, amihez nyomd meg a „Bejelentkezés” gombot (1) > „Regisztrálj” (2) és utána töltsd ki a regisztrációs lapot a saját adataiddal és kövesd a képernyőn látható instrukciókat.

Amennyiben bármikor ki szeretnél lépni a portálról, csak nyomd meg a  gombot a képernyő jobb alsó sarkában (3), ez visszavisz a GLOW készülék fő menüjébe.

Miután beregisztráltál a saját fiókodba, a képernyő jobb felső sarkában meg fog jelenni a felhasználói neved (4). A felhasználó névre kattintva meg fog jelenni a lehetőségek sávja.

Itt szerkesztheted a profil beállításaidat, megnézheted az üzeneteidet, az aktivitásaidat, a kapcsolataidat, új képeket tölthetsz fel a galériádba és kijelentkezhetsz a saját fiókodból, úgy, hogy rákattintasz a felhasználó nevedre és kiválasztod a kívánt cselekvést.

A nyelv megváltoztatásához kattints a nyelv gombra a felhasználó neved mellett és válaszd ki a használni kívánt nyelvet (5).

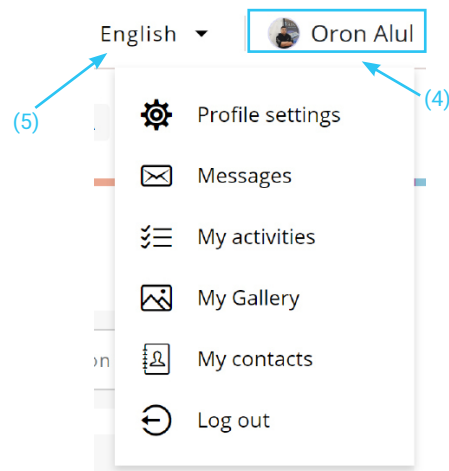

## Profil beállítások:

Nézd át és szerkeszd a saját felhasználói fiókodban lévő információkat a Profil beállítások oldalon.

Itt meg tudod változtatni az e-mail címedet, a jelszavadat, a nevedet, az országodat és a „Rólam” fül alatt lévő információkat. Fel tudsz tölteni magadról profil képet, amihez nyomd meg az „Adj hozzá képet” gombot (6). (További információkért, hogy hogyan tölts fel fájlokat a portálra, úgy mint, képeket és videókat, kérjük olvasd el a „Fényképek / Videók hozzáadása” részt.)

Nyomd meg a „Mentés” gombot, hogy elmentsd a változtatásokat. (7)

Véglegesen törölheted is a fiókodat a „Fiók törlése” gombra kattintva (8). Figyelem, a fiók törlése végleges és nem visszaállítható.

**Profile settings**

Email address  
oron@npm.co.il

Password  
\*\*\*\*\*

**Personal Info**

First name  
Oron

Last name  
Alul

Country  
Israel

Save Cancel

Notifications settings

Profile picture: Add photo (6) Delete

About me  
My name is Oron Alul and I live in Israel. I am a part of NPM International's GLOW development team.

Delete account (8)

## Üzenetek:

Ez a felhasználói bejövő üzenetek fiókod.

Itt olvashatod a korábbi üzeneteket és beszélgetéseket (9), új üzeneteket írhatasz (10), hírleveleket kaphatsz a NPM Internationaltól (11) vagy üzenetet küldhetsz az adminisztrátornak (12).

Frissítheted a bejövő üzeneteidet az „Üzenetek frissítése” gombra kattintva (13), azért, hogy le tud ellenőrizni, hogy kaptál-e új üzeneteket.

**Messages** Filter messages by user Send Message to Admin New message Refresh

Messages to me (9) Messages from me (12) Messages from NPM International (10) (13)

Admin NPM Support: Bug Report  
23.01.2019 13:52  
Hello dear Oron, Thank you bringing this to our attention. A question mark will be...

Anonym Anonym You so awesome  
21.10.2018 11:40  
let's be friends! (9)


## Új üzenet írása már meglévő felhasználónak:

Új üzenet írásához kattints az „Új üzenet” gombra (10).

Egy ablak fog felugrani.

Ebbe az ablakba írd be a címzett nevét (amint megjelenik a felhasználóneve), a beszélgetés tárgyát és magát az üzenetet.

Miután minden szükséges mezőt kitöltöttél nyomd meg a „Küldés” gombot.

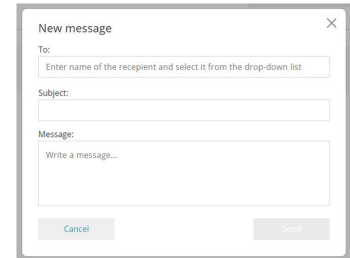


## Új üzenet írása az adminisztrátornak:

Kattints az „Új üzenet az Adminnak” gombra (12) azért, hogy új üzenetet ír az adminisztrátornak. Egy ablak fog felugrani.

Ebbe az ablakba írd bele a beszélgetést tárgyát és magát az üzenetet.

Miután minden szükséges mezőt kitöltöttél, nyomd meg a „Küldés” gombot.

Az üzenet el lesz küldve az NPM Interntional adminisztrátorának, és te is fogsz egy válasz üzenetet kapni a bejövő üzeneteid mappába.

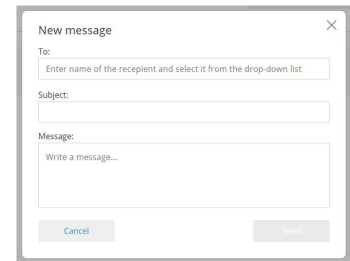


## Az üzenetküldés rendszere:

A képernyő tetején láthatod a beszélgetés első üzenetét + a beszélgetés tárgyát (14).

Ahhoz, hogy új választ írhasz, nyomd meg a „Te üzeneted itt” feliratú ablakot (15), írd bele a válaszod és nyomd meg a „Küldés” gombot (16).

A lap alján a beszélgetés előző válaszait láthatod (17). A legutolsó válasz fog a tetején megjelenni.

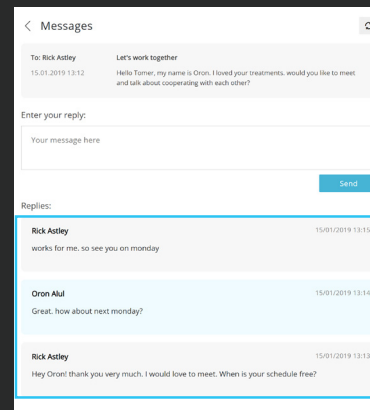

← (14)

← (15)

← (16)

← (17)

## Saját tevékenység:

Ebben a részben a portálon belüli összes tevékenységed összefoglalóját láthatod. Ezen a területen a legfrissebb topikok (18), az legutolsó válaszok (19) és a Képzés részhez feltöltött videóid (20) kapnak helyet.

Például:

Ráklíkkelve egy újabb tevékenységre egyenesen az adott tevékenység oldalára leszel átirányítva vagy arra az oldalra, ahol ez a tevékenység megtörtént.

## Kapcsolataim:

A „Kapcsolataim” oldalon azokat a felhasználókat láthatod, akikkel kapcsolatban állsz.

Rá kattintva egy felhasználó nevére, automatikusan az ő profiljára irányít a rendszer (21).

Küldj gyors üzeneteket a „Kapcsolataim” oldalról az „Üzenetküldés” gombra kattintva (22), vagy nézd végig egy adott kapcsolat korábbi beszélgetéseit az „Üzenet előzmények” gombra kattintva (23).

Keress a névjegyek között úgy, hogy lenyitod a keresősávot és ott rákattintasz a „Keresés a kapcsolataim között” fülre (24) és beírod a partner nevét a keresősávba (25).

Adj új névjegyet a meglévőkhöz úgy, hogy a keresési sávban rákattintasz a „Keresés minden kapcsolat” fülre (24), és beírod a partner nevét a keresősávba (25).

Törölj egy partner a „Kapcsolataim” listájából egyszerűen. Nyomd meg a „Törlés a partnerek közül” gombot (26).


## My activities


Topics	Replies	Videos	
(18)	(19)	(20)	2 Topic(s)   2 Reply(s)   1 Video(s)
Latest topics			
master class of toni 20/12/2018 14:18			
by: <a href="#">Oron Alul</a> category: <a href="#">Social Special Events</a> language: <a href="#">English</a> 2 reply(s)			
cosmoprof bologna 2019 16/12/2018 09:30			
by: <a href="#">Oron Alul</a> category: <a href="#">Discussion Special events</a> language: <a href="#">English</a> 0 reply(s)			

## My contacts

(24) (25)

Search my contacts Search for contacts

 **Moshe Alul** (21)  
nmoshe@gmail.com (22)  
Israel (23)  
[Remove from contacts](#)


 **Rick Astley**  
nevergonna@giveuup.com  
United Kingdom  
[Remove from contacts](#) (26)

[Send message](#)  
[Message history](#)  
[Send message](#)  
[Message history](#)



## Felhasználói Profilok:

Ráklikkelve egy kapcsolat nevére, egyenesen az adott partner profil oldalára irányítanak. Adott kapcsolat profil adatlapján minden legutolsó tevékenységét láthatod (27), küldhetsz neki üzenetet (28) és hozzáadhatod a saját kapcsolataid listájához (29).

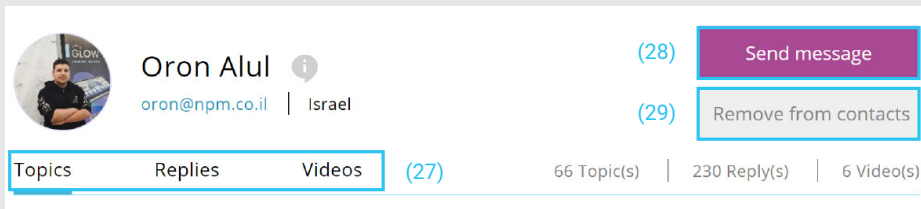


The screenshot shows a user profile for Oron Alul. On the left is a circular profile picture of a man in a black shirt. To the right of the picture, the name "Oron Alul" is displayed in a large font, with a small information icon to its right. Below the name is the email address "oron@npm.co.il" and the location "Israel". To the right of the profile information are two buttons: a purple "Send message" button with "(28)" next to it, and a grey "Remove from contacts" button with "(29)" next to it. Below the profile information is a navigation bar with three tabs: "Topics", "Replies", and "Videos". The "Videos" tab is selected and highlighted in blue, with "(27)" next to it. To the right of the tabs, the following statistics are shown: "66 Topic(s) | 230 Reply(s) | 6 Video(s)".

## Mi az újdonság:

Ez az a funkció, ahol a PMU ipar mindenféle újdonságairól friss híreket kaphatsz. Ez a rész automatikusan frissül időről időre és itt híreket, cikkeket olvashatsz a közeljövőben megrendezésre kerülő kiállításokról és mesterképzésekről, új termékekről, új trendekről, tréning videókról, új technikákról, népszerű művészekről és sok más egyéb témáról, ami érdekes lehet a számodra.

Azért, hogy többet is megtudj a különböző cikkekről és témákról, kattints a „Mi az újdonság” gombra (30).

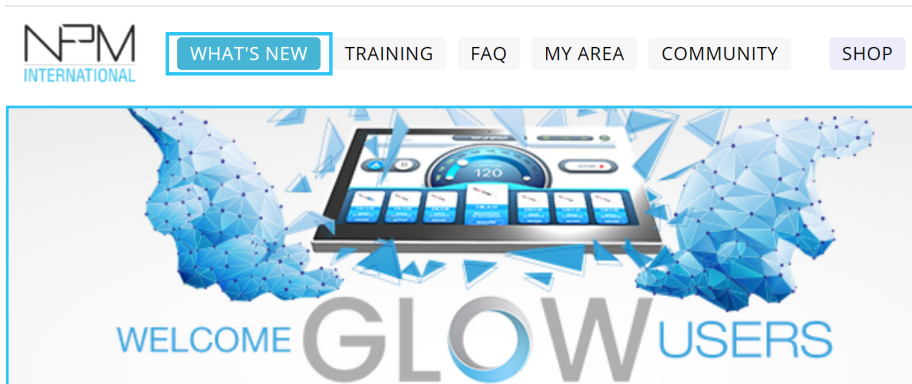

The screenshot shows the top navigation bar of the NPM International website. The logo "NPM INTERNATIONAL" is on the left. To its right is a navigation menu with several buttons: "WHAT'S NEW" (highlighted in blue), "TRAINING", "FAQ", "MY AREA", "COMMUNITY", and "SHOP". Below the navigation bar is a large banner with a blue and white geometric design. The banner features a central image of a tablet displaying a dashboard with a gauge showing "120". Below the tablet, the text "WELCOME GLOW USERS" is displayed in a large, bold, sans-serif font. The "GLOW" part of the text is significantly larger than the other words.

(30)

## Képzések:


A képzések részénél megnézhetesz (31) és feltölthetsz (37) PMU, HFS, Mezoterápiás és Egészségüggyel kapcsolatos videókat, amelyek más GLOW felhasználók által készültek és lettek feltöltve és megosztva.

Amennyiben egy bizonyos videót szeretnél megnézni, kattints az adott videóra (31). Azután nyomd meg a „Lejátszás” gombot a bal alsó sarkában a videóban (32). Kérjük vegyék figyelembe, hogy vannak videók, amelyek nem ingyenesek és elő kell fizetni rájuk, hogy megnézhesd őket. Azok a videók, amelyek promóciós célból készültek, .... jellel vannak jelölve.

Kedvelhetsz is videókat a ... ikonra kattintva (33).

Ha kommentelni szeretnél valamit, ez esetben írd a véleményed a vélemény dobozba (34) és nyomd meg a „Küldés” gombot (35).

Amennyiben olyan videót találsz, amelyről úgy gondolsz, hogy megsérti és ellentmond az elveinknek és az iránymutatásainknak, kérlek jelentsd azt a „Video jelentése” gombra kattintva (36).

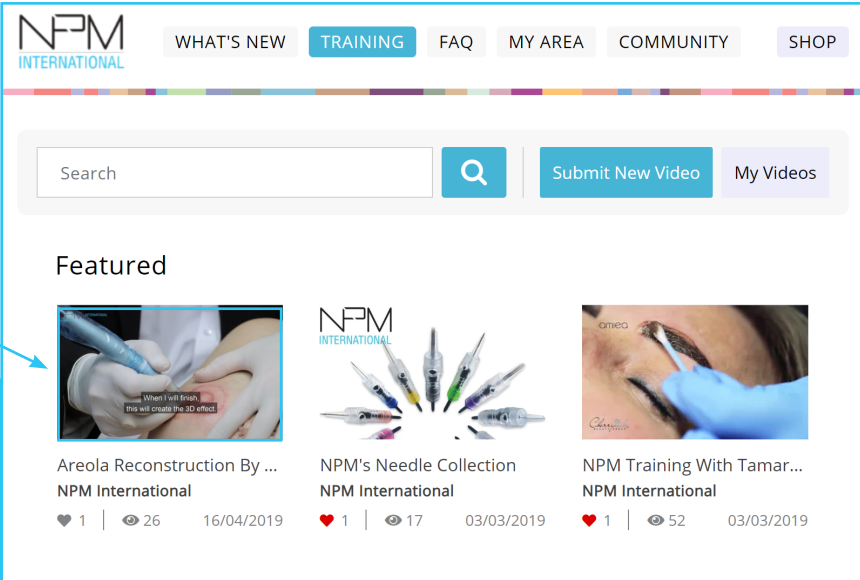

The screenshot shows the NPM International website interface. At the top, there is a navigation menu with links for 'WHAT'S NEW', 'TRAINING', 'FAQ', 'MY AREA', 'COMMUNITY', and 'SHOP'. Below the navigation is a search bar with a magnifying glass icon, a 'Submit New Video' button, and a 'My Videos' button. The main content area is titled 'Featured' and displays three video thumbnails. The first thumbnail, labeled with a blue arrow and '(31)', shows a person's hands performing a procedure on a breast. The second thumbnail shows a collection of various needles. The third thumbnail shows a person's face being treated with a needle. Each video thumbnail includes the video title, the channel name 'NPM International', and engagement statistics (likes and views).

Video Title	Channel	Likes	Views	Date
Areola Reconstruction By ...	NPM International	1	26	16/04/2019
NPM's Needle Collection	NPM International	1	17	03/03/2019
NPM Training With Tamar...	NPM International	1	52	03/03/2019

### Areola Reconstruction By Moshe Alul



NPM International

1 | 
 24 | 
 03/03/2019 | 
 [Report video](#) (36)

(33)

The master Moshe Alul in action, teaching how to perform areola reconstruction from scratch

Category: [Areola](#)

Tags: [Areola](#), [Nipple Reconstruction](#), [Moshe Alul](#), [Guide](#), [Subtitles](#), [English Subtitles](#), [Areola Reconstruction](#), [NPM International](#)

Enter your comment:

(34)

(35)

Send

Search



Submit New Video

My Videos

(37)

### Uploading

Select video file to upload maximum size is 2 GB

Enter video title

Select video category

Enter video description

Enter a tag name and press Enter to add a tag

Upload Video Thumbnail

\*For correct thumbnail display, it is recommended to use an image with a 16:9 aspect ratio.

I agree to provide rights to my video to NPM International

Submit

Új videó feltöltése esetén nyomd meg a „Új videó beküldése” (37) gombot a fő menü Képzés menüpontjának képernyőjén.

Értesítést fogsz kapni, amikor a videó feltöltésre kerül és kész lesz a megtekintésre.

(Bővebb és részletesebb leírásért, hogy hogyan tölts fel fájlokat, például videókat a portálra, kérjük olvasd át a „Képek / Videók hozzáadása” részt.)

## Gyakori kérdések:

A Gyakori kérdések részben, megbízható és azonnali válaszokat találsz általános kérdésekre.

Amennyiben egy már meglévő kérdésre/válaszra keresel rá, írd be a kérdésed a „Gyakori kérdések kereső sávjába” (38).

Egy kérdés megválaszolására kattints a + jelre (39), vagy ha csökkenteni szeretnéd a megnyitott válaszok számát nyomd meg a – jelet (39).

A kérdések kiválasztása a különböző kategóriákból a „Kategória választás” gomb megnyomásával érhető el (40), ahol a kívánt kategóriára kattintva megtalálhatjuk, amit keresünk.

Természetesen te is tehetsz fel kérdéseket a „Kérdezz Tőlünk” gomb megnyomásával (41).

Miután megnyomtad a gombot (41) egy ablak fog megjelenni és felugrani.

Ezután a felugró ablakban válaszd ki a kérdésedhez tartozó kategóriát, gépeld be a kérdést a „Írd ide a kérdésed” dobozba (42) és kattints a „Küldés” gombra a felugró képernyő jobb alsó sarkában.

A kérdésedet egy admin fogja elolvasni és ő is fog rá válaszolni. A választ privát üzenetben is meg fogod kapni, illetve a kérdésed a Gyakori kérdések adatbázisába is fel lesz töltve.

The screenshot displays the NPM International website's 'Frequently Asked Questions' section. At the top, there is a navigation bar with links for 'WHAT'S NEW', 'TRAINING', 'FAQ', 'MY AREA', 'COMMUNITY', and 'SHOP'. The main heading is 'Frequently Asked Questions'. Below this, there is a search bar with a dropdown menu for 'Select Category' and a text input field for 'Please enter your question'. A magnifying glass icon is on the right of the search bar. Below the search bar, there are two question cards. The first card is expanded, showing the question 'How To Perform The Hair Stroke Effect?' and a detailed answer. The second card is collapsed. A 'Please ask us' button is visible below the question cards. A modal window titled 'Ask a question' is open, showing a category dropdown and a text input field for the question. The modal window has a 'Cancel' button and a 'Send' button.

(40) → Select Category

(38) → Please enter your question

(39) → +

(39) → -

(38) → How To Perform The Hair Stroke Effect?

Category: [Tips](#)

How To Perform The Hair Stroke Effect?

This type of effect requires a lot of skill and knowledge of the needle theory and color theory. In most cases the needle which suits this type of effect the best would be a single Long Tapper (LT) needle such as the following NPM needles:  
1RL 0.40 LT White, 1RL 0.35 LT White and 1RL 0.17 LT Red.

Category: [Tips](#)

Did not find an answer to your question?

Please ask us

Ask a question

Select Category

Enter a question

Cancel Send

## Webshop:

Amikor belépsz a Shop-ba a következő képernyő jelenik meg:


### WELCOME TO THE SHOP!

Please enter your **Shop Access Code** in the field below

CONTINUE

What is it ?

Gépeled be az 5 jegyű „Shop belépési kódodat”, amelyet a GLOW eszközzel kaptál azért, hogy beléphess a shop-ba.

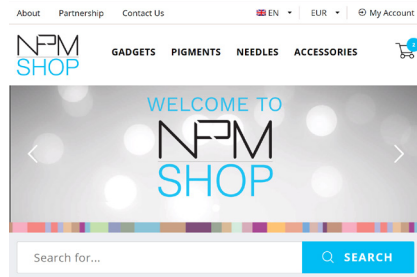

[example of web shop home page]

### Our Products



## Kapcsolat:


A legördülő listából válaszd ki a kontakt tárgyát és töltsd ki az ott található űrlapot az érdeklődéseddel / kérdéseddel kapcsolatban. Nyomj rá a küldés gombra, hogy felvehesd velünk a kapcsolatot. Választ fogsz kapni az NPM Internationaltól a beérkezett üzenetekben a kérdéseddel kapcsolatban.

### A 3 „Saját fiókom” rész:

„Időbeosztásom” – az a rész, ahol láthatod és szerkesztheted a saját időbeosztásodat. Új találkozókat és megbeszéléseket is tudsz szervezni és létrehozni ebben a részben.

„Partner Kártyák” – az a rész, ahol új partner kártyákat tudsz készíteni és szerkesztheted vagy átnézni a már meglévő partner kártyákat.

„Saját Készlet” – ahol nyomon követheted, kezelheted és módosíthatod a készletedet.

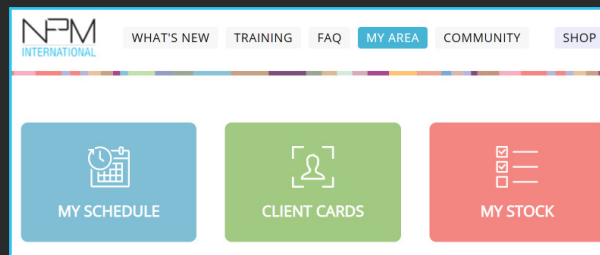

#### Saját Készlet:

Ezen a képernyőn tudod követni és kezelni az üzleti készletedet. Rendezd a felszereléseidet és készleteidet különböző kategóriákba a „Kategória választás” gomb megnyomásával (43) és válaszd ki a kívánt kategóriát.

Ahhoz, hogy új felszerelést és terméket adhass a készletedhez kattints a „Felszerelés hozzáadása” gombra. (44)

Miután megnyomtd a „Felszerelés hozzáadása” gombot egy ablak fog felugrani.

Töltsd ki az üres mezőket a termék nevével, a termék besorolásával és a készleten lévő mennyiséggel.

Miután kitöltötted az összes mezőt, nyomd meg a „Mentés” gombot, hogy elmenthesd az adatokat. (Bizonyos esetekben amikor az NPM előre beállított

adatbázisából választasz terméket, a kategória automatikus be lesz állítva.)




Miután hozzáadtad az új felszerelést a készletedhez az meg fog jelenni a „Saját készlet” fül alatt.

Itt a felszerelés megnevezését (45), kategóriáját (46) és a meglévő mennyiségét (47) láthatod.

Itt tudsz pluszban hozzáadni vagy csökkenteni a mennyiségén bizonyos termékeknek a - + gombok megnyomásával (48), azután mentsd el a változásokat a ... gomb megnyomásával (49).

Ha egy termék nevére rákattintasz egy ablak fog felugrani.

Ebben az ablakban minden információt megtalálsz az adott termékről, szerkesztheted (51) és törölheted (50) is azt a készletedből. Beállíthatatsz alacsony készlet információkat is a termékről.

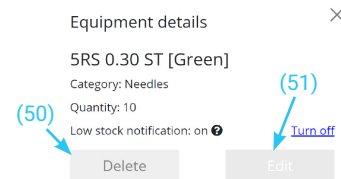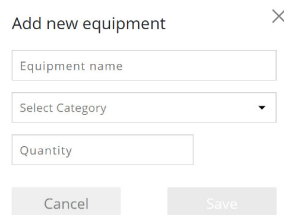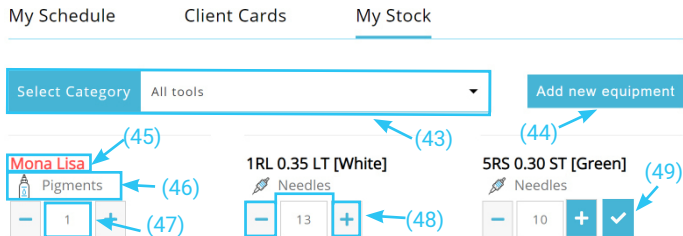

## Partner Kártyák:

A „Partner Kártyák” fül alatt kezelheted a már meglévő ügyfeleidet és új partnereket is hozzáadhatsz.

Megtekintheted mit kell tudni egy adott ügyfélről: információkat, feljegyzéseket róla, a preferenciáit és a kezeléseinek történetét is (54). Elmentheted az ügyféllel kapcsolatos összes adatokat, bőrtípus információit, különleges preferenciáit és egyéb más információkat, amelyekre fontos, hogy emlékezz a későbbiekben, amikor az adott ügyféllel dolgozol.

Kereshetsz a meglévő partnereid között a partner kereső sávban. (52)

Új partner felvételéhez nyomd meg a „Partner hozzáadása” gombot (53).

### Új partner hozzáadása:

Miután ráklickeltél az „Új partner hozzáadása” gombra (53), át leszel irányítva az „Új partner hozzáadása” oldalra.

Ezen az oldalon töltsd ki a kért adatokat erről az ügyfélről. Miután kitöltötted az összes szükséges információt nyomd meg a „Mentés” gombot.

Miután hozzáadtad az új partnert az adatbázisodhoz, lehetőség lesz, hogy átnézhesd a kezelési történetét, a speciális preferenciáit, információkat a bőréről, a személyes információkat róla, a megjegyzéseket, kapcsolati adatait (54), amelyeket bármikor frissíthetsz is (56).

### Ügyfélkártya áttekintése:

Miután hozzáadtad az új partnert lehetőség lesz, hogy átnézd az összes információt róla (54), kezelési/időponeti/tárgyalási előzményeit (55) vagy új megbeszélést és időpontot szervezz vele.

Bármikor frissítheted és megváltoztathatod a partner adatait a „Szerkesztés” gomb megnyomásával (56).

Törölheted is a partnert a „Törlés” gomb megnyomásával (57).


The screenshot displays the 'Client Cards' section of a software interface. At the top, there are three tabs: 'My Schedule', 'Client Cards' (which is active), and 'My Stock'. Below the tabs is a search bar with the placeholder text 'Search by a Client Name' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a blue button labeled 'Add client' with the number '(53)' next to it. Below the search bar is a form with several input fields: 'Client Name', 'Phone Number', and 'Email'. Below these are sections for 'Personal Info', 'Skin Info', and 'Note', each with a large text area. At the bottom of the form are two buttons: 'Save' (blue) and 'Cancel' (grey). To the right of the form is a 'Schedule' card with a plus icon and the text 'You can add this Client to your schedule'. Below this is a detailed client card for 'Steve Notch'. The client card includes a phone number (+972501234567), an email address (example@email.com), a 'Personal Info' section with a note about a busy schedule, a 'Skin Info' section with a note about sensitive skin, and a 'Note' section. At the bottom of the client card are 'Edit' and 'Delete' buttons. Blue arrows with numbers point to various elements: (52) points to the search bar, (53) points to the 'Add client' button, (54) points to the client card, (55) points to the 'Schedule' card, (56) points to the 'Edit' button, and (57) points to the 'Delete' button.

## Időbeosztásod:

A naptárban átnézheted a tervezett időbeosztásodat, tervezhetsz új megbeszéléseket és tárgyalásokat, átnézheted a tárgyalásaid előzményeit és több információt is szerezhetsz egyes megbeszélésekről.

Ahhoz, hogy egy új időpontot vigyél fel a naptárdba, kattints a kívánt dátumra azután nyomd meg a „Új időpont hozzáadása” gombot (58).

Miután megnyomod az „Új időpont hozzáadása” gombot, egy ablak fog felugrani.

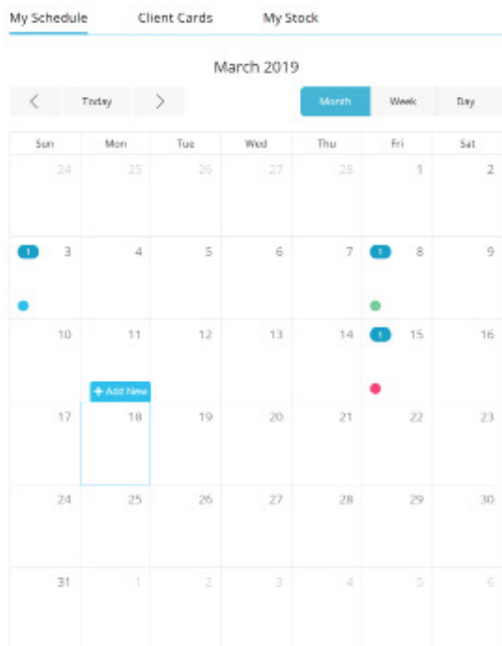


Töltsd ki az űrlapot a partner nevével, a procedúra/találkozó típusával, a kívánt dátummal és időponttal, de ha van, akkor különleges megjegyzéseket is tehetsz hozzá.

Amikor elkészültél ezzel az egész procedúrával és el akarsz menteni az adatbázisodba, dokumentálási célból, klikkelj a „Procedúra kész” dobozra (59).

Miután minden szükséges információt kitöltöttél nyomd meg a „Mentés” gombot.

(Kérjük vegye figyelembe, hogy a Partnernek léteznie kell a Partner kártyák sorában. Egy új ügyfél hozzáadása esetén térj vissza az adott funkcióhoz (53))




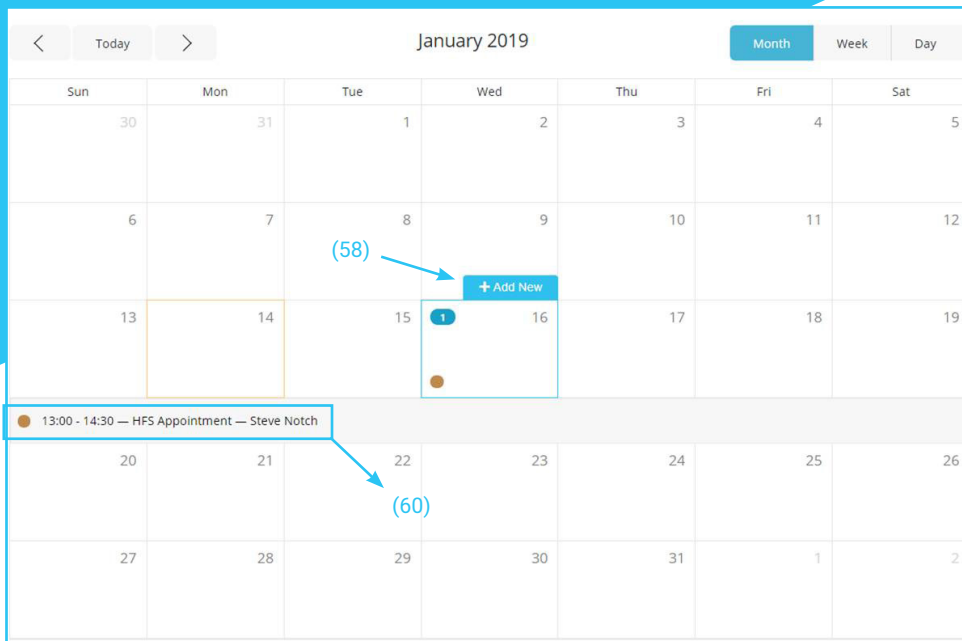


Miután egy adott találkozó beütemezésre került, az meg fog jelenni a naptárban a tervezett ütemterv dátuma és időpontja szerint. A találkozó minden típusa más színnel van jelölve.




További információkat kaphatsz egy-egy tervezett találkozóról, ha rákattintasz az adott napra és az adott eseményre (60). Ekkor egy ablak fog felugrani.

Ebben a felugró ablakban tudod megszerkeszteni a találkozó részleteit (61), vagy egyenesen az adott partner Ügyfél Kártyájára tudsz menni, ha rákattintasz a partner nevére (62).

Törölheted is a találkozót, ha megnyomod a „Törlés” gombot (63).

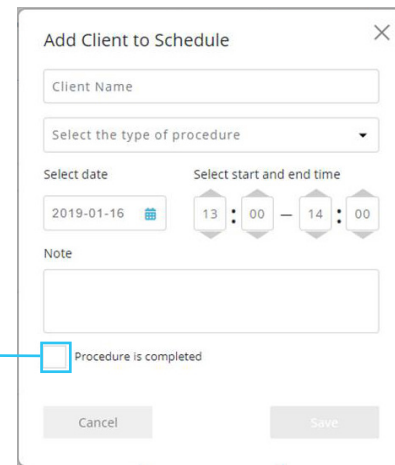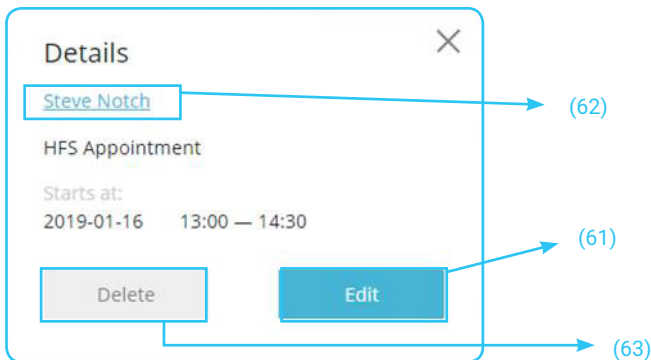

A saját naptáradat Hónap / Hét / Nap elrendezés szerint is megtekintheted a képernyő jobb felső sarkában található gomb megnyomásával.

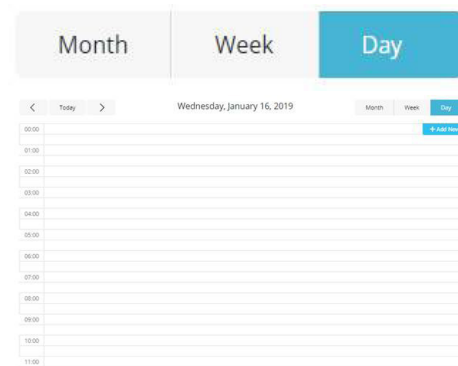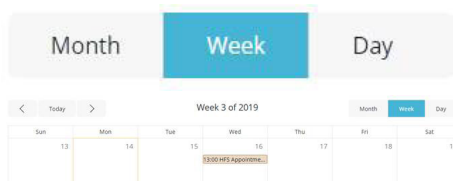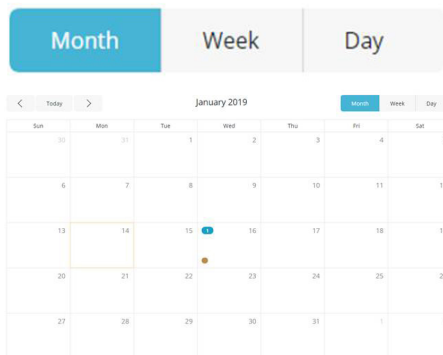


## Közösség:

A közösségi funkció a portál fórumközpontja, ahol megtekintheted és kommentálhatsz a PMU-val kapcsolatos témákat, és feltöltheted a saját témádat is a fórumra.

A közösségi fórum fő tervezetében látható az összes új és rögzített téma. Láthatod, hogy ki töltötte fel az adott témát (64), a kategóriáját a témának (minden egyes kategória különböző színnel van jelölve) (65), a nyelvet, amin íródott (66), a téma dátumát (67) és hogy mennyi választ érkezett rá (68).

A témákat rendezni lehet a kategóriájuk (69), a nyelvük (70) alapján vagy lehet különleges témákat is keresgélni a kereső sávban (71).

Azért, hogy bizonyos témákat megnézhess rájuk kell kattintani.



A rögzített témák azok, amelyek mindig a lista tetején jelennek meg. A rögzített témákat  jellel láttuk el.

Community Add topic

All languages

DISCUSSION TIPS


Latest topics

-  Come And Meet NPM @ Beauty Düsseldorf 2019!  
by: Admin category: Social Special events  
language: English 07/02/2019 14:40  
10 Reply(s)
-  Come And Meet NPM @ Cosmoprof Bologna 2019!  
by: Admin category: Social Special events  
language: English 06/02/2019 12:30 | Edited  
0 reply(s)

Miután rákattintottunk egy témára, az meg fog nyílani, a téma/vita tartalmával együtt (72), írhatsh hozzá saját választ is, az „Írd ide a válaszod” dobozba (73), és képet is tölthetsz fel hozzá (74).

(Részletesebb leírásért, vagyis, hogy hogyan tölts fel fájlokat a portálra, kérlek olvasd át a „Képek / Videók hozzáadása” fejezetet.)

Görgecs le a téma aljára, hogy az összes a témához kapcsolódó választ megtaláld (75).

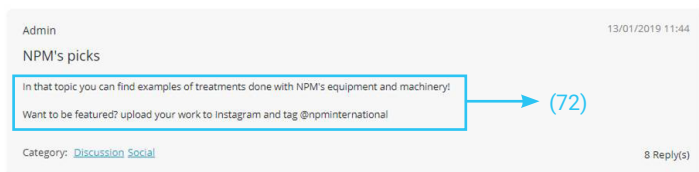


Enter your reply:

The reply form consists of a large text input box (73) and an "Attach Image" button (74) with a paperclip icon.

Send


Replies:

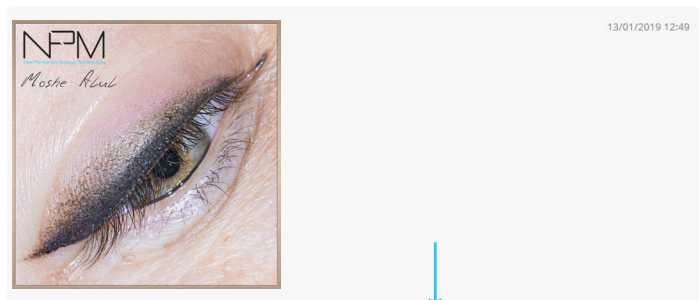

27

## Új téma létrehozása:


Ahhoz, hogy egy új témát adhass hozzá a Közösségi részhez, nyomd meg a képernyő jobb felső sarkában látható „Téma hozzáadása” gombot (76).

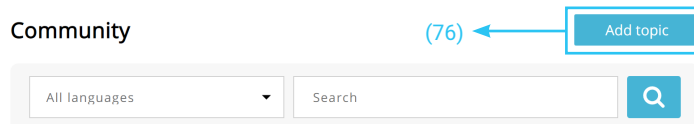

Ezekután át leszel irányítva a „Téma hozzáadása” oldalra.

Töltsd ki a kötelező mezőket, majd válaszd ki, hogy melyik témakör illik a legjobban a feltölteni kívánt témához (77). 1-nél több témakört is kiválaszthatshz. Amennyiben úgy gondolod, hogy a felvetett témád hasznos és fontos és úgy látod, hogy rengeteg tag olvassa, megkérheted az adminisztrátort, hogy rögzítse a témát a „Kérd az adminisztrátort, hogy rögzítse a témát” gomb megjelenésével.

Miután feltöltötted a témát, nyomd meg a „Küldés” gombot.

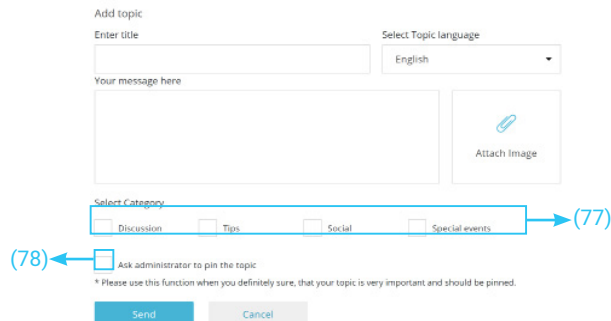

## Képek hozzáadása a galériához:

Kattints a „Galériám” gombra a Felhasználó név alatt található legördülő sávban. Nyomd meg az „Új fénykép hozzáadása” gombot.

Add new image


Szkenneld be a megadott QR kódot a mobiltelefonod QR szkennelő alkalmazásával (okostelefon/tablet...).



My Gallery



The image has been successfully added to the Gallery. Please get back to your device to continue the work

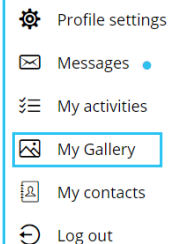


Mobilkészülékeden nyomd meg a „Fénykép hozzáadása” gombot és válaszd ki a feltölteni kívánt képet.

Nyomd meg a „Fénykép hozzáadása” gombot.

Miután a fénykép sikeresen feltöltődött, nyomd meg a „Galériám” gombot.

Most már a fénykép meg kell, hogy jelenjen a galériában. Feltöltheted és a portál különböző részeinél fel is használhatod őket.

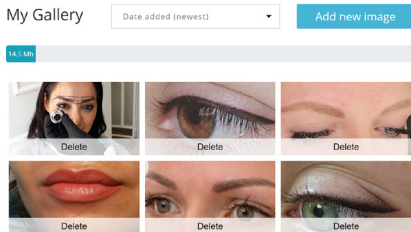

## Videó hozzáadása:


A „Képzés” résznél nyomd meg az „Új videó hozzáadása” gombot.

Submit New Video

Szkenneld be a QR kódot a mobiltelefonod QR szkennelő alkalmazásának a segítségével (okostelefon/tablet...).



Training main page

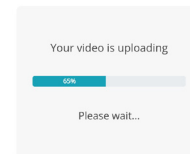

A telefonod most a „Feltöltés” oldalt mutatja. Ezen az oldalon töltsd ki a kötelezően kitöltendő mezőket a videóddal kapcsolatos adatokkal: Cím, Leírás, Kategória és Címkék. (A kiválasztott videóból vázlatképet is fel tudsz tölteni (ügynevezett előnézeti kép). Ha nem töltesz fel vázlatot, akkor rendszer automatikusan választ egy képet a videóból.)

Nyomd meg a „Jóváhagyás” gombot az oldal alján. Várd meg, amíg betölt a képernyő a befejezéshez. Miután a videódd sikeresen feltöltődött a rendszerünkre, mi átnézzük azt, hogy leellenőrizzük, valóban megfelel-e és nem ellenkezik-e a közösségi szabályzatainkkal. Értesítést fogunk küldeni, amelyet az üzeneteid között fogsz megtalálni, amint jóváhagytuk a feltöltött videót.

### Uploading

Select video file to upload  
maximum size is 2 GB

Enter video title

Select video category

Enter video description

Enter a tag name and press Enter to

Upload Video Thumbnail

\*For correct thumbnail display, it is recommended to use an image with a 16:9 aspect ratio.

I agree to provide rights to my video to NPH International

Submit

## Hibajavítás:

### Kézi egység nem működik

- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a Kézi egység megfelelően csatlakoztatva van-e az eszköz egyik bemenetébe a GLOW készülék hátulján.
- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a Kézi egység kábele megfelelően csatlakoztatva van a Kézi egységhez. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbáld meg kihúzni a Kézi egységet (a kábel típusa 3.5 mm Stereo AUX kábel).
- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a Kézi egységhez és a kiválasztott bemenet a képernyőn (A/B) megegyezik.

### A Kézi egység működik, vibrál, de a tű nem mozog

- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a tű megfelelően lett betéve a helyére.
- ✓ Csavard ki a tűt a kezelőből, majd csavard újra vissza.

### A billentyűzet eltakarja a képernyőt

- ✓ Megigazíthatod a billentyűzet pozícióját a képernyő felső részénél, úgy, hogy megnyomod a billentyűzet felső részét és áthúzod a képernyőn.
- ✓ Megigazíthatod a billentyűzet méretét a + / - gombok nyomva tartásával a billentyűzet jobb sarkánál.
- ✓ Zárd be a billentyűzetet a képernyőre kattintva a billentyűzeten kívül.

### A billentyűzet túl kicsi / túl nagy

- ✓ Megigazíthatod a billentyűzet méretét a + / - gombok nyomva tartásával a billentyűzet jobb sarkánál.

### Nem tudok a saját nyelvemre írni

- ✓ Változtasd meg a billentyűzet nyelvezetét a billentyűzet bal sarkánál található nyelv gombra kattintva.

### Nincs fény az eszköz aljánál

- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a Világítás gomb, be lett kapcsolva az eszköz beállítások menüjében.

### Semmilyen hangot nem ad ki az eszközöm

- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a Hangerő gomb be lett kapcsolva az eszköz beállítások menüjében.
- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a videó, amit meg akarsz nézni, vagy a zene, amit meg akarsz hallgatni nem lett-e lenémítva.

### Nem tudom az eszközümet a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni

- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a helyes jelszót adtad-e meg (amennyiben a Wi-Fi hálózat, amelyhez csatlakozni szeretnél nem jelszóval védett, hagyd a jelszó mezőt üresen).
- ✓ Bizonyosodj meg arról, hogy a Wi-Fi hálózat elég erős és stabil, vagy próbáld meg egy másik hálózatra felcsatlakozni.

### A kezelés, amit alkalmazni szeretnék, nem jelenik meg a készülékem kezelési listájába

- ✓ Manuálisan indítsd el a kezelési menüt a Gyors Elérés Menü gomb megnyomásával az eszköz bal felső sarkában és válaszd ki a „MUNKA” menüpontot. Ezen a képernyőn válaszd ki a kívánt sebességet és a kézi egység bemenetét manuálisan. Ne felejtse el, hogy ha nem tudod, hogy milyen sebesség, tük vagy Kézi egység bemenet a javasolt a kívánt kezeléshez, mindig lehetséges van segítséget kérni a többi GLOW tagtól a közösségi fórumon.

### A kijelző villog / megváltoztatja a színét / bekapcsolva marad, lekapcsolás után is

- ✓ Nyomd meg a Ki-/ Bekapcsoló gombot a készülék hátulján

## Nem érem el a shop-ot

✔ A bolt eléréséhez a GLOW eszközön szükséged van egy Shop Elérési Jelszóra. Ezt a kódod megkapod, amikor megvásárolod az eszközt a helyi NPM kereskedőtől. Abban az esetben, ha valamiért mégsem kapnád meg, hívd fel a helyi NPM kereskedőt, akitől vásároltad a GLOW készülékedet vagy lépj kapcsolatba az NPM International-al a [www.npm-int.com](http://www.npm-int.com) weboldalon vagy a készülék Kapcsolatok részénél.

## Csatlakoztattam a GLOW készülékeket az elektromossághoz, de mégsem kapcsol be

- ✔ Bizonyosodj meg arról, hogy a bemutatott használati utasításnak megfelelően csatlakoztattad az AC hálózati adaptert
- ✔ Bizonyosodj meg arról, hogy megnyomtad a bekapcsoló gombot a készülék hátulján
- ✔ Előfordulhat, hogy a hálózati adapter nem illeszkedik az országban lévő feszültséghez, ilyenkor lépjén kapcsolatba a helyi NPM kereskedőjével.

## Nem tudok fényképet / videót feltölteni a QR szkenneléssel

- ✔ Próbáld meg beolvasni a QR kódot és győződj meg arról, hogy nincs a QR kódon fényvisszaverődés a mennyezetről és / vagy „sérülés” a QR kód alakján vagy színén.
- ✔ Engedélyezd a böngésződ számára, hogy hozzáférhessen a kamerához és az okos eszközödnön tárolt fájlokhoz.
- ✔ Próbáld meg másik QR olvasó alkalmazást használni.
- ✔ Próbáld ki másik okos eszközzel (telefon / tablet).

## Nem tudok bejelentkezni a fiókomba

- ✔ Bizonyosodj meg arról, hogy helyesen írtad-e be az e-mail címedet és a jelszavadat
- ✔ Ha elfelejtetted a jelszavadat, állítsd vissza azt az oldalon a Napló „Elfelejttem a jelszavam” gombjával.
- ✔ Bizonyosodj meg arról, hogy van felhasználói fiókod. Amennyiben nincs felhasználói fiókod, létrehozhatod egyet a „Regisztráció” gombra kattintva és a képernyőn megjelenő instrukciókat követve.
- ✔ Előfordulhat, hogy a felhasználói fiókod törlésre vagy zárolásra került egy

adminisztrátor által vagy általad. Amennyiben kérdésed van, lépj kapcsolatba az NPM-mel a [www.npm-int.com](http://www.npm-int.com) weboldalon vagy pedig a Kapcsolatok részénél az eszközön.

## Nem érek el néhány menüpontot vagy nem tudok aktiválni néhány funkciót a GLOW weboldalon

- ✔ Bizonyosodj meg arról, hogy be vagy jelentkezve a fiókodba. Néhány rész azonnal elérhetővé válik, amint bejelentkezel.
- ✔ Előfordulhat, hogy a fiókod blokkolta bizonyos funkciók elérését vagy bizonyos műveletek végrehajtását a portálon. Ha bármilyen kérdésed lenne, fordulj bizalommal az NPM-hez a [www.npm-int.com](http://www.npm-int.com) címen vagy a készülék „Kapcsolat” menüpontjában.

## Nem értem az eszközön beállított nyelvet

- ✔ A nyelv megváltoztatáshoz menj a készülék beállítások képernyőjére, kattints a nyelv kiválasztása gombra és a legördülő listából válaszd ki a használni kívánt nyelvet. Vagy (amennyiben a weboldal nyelvét szeretnéd megváltoztatni), nyomd meg a nyelv gombot a képernyő jobb felső sarkában és a legördülő listából válaszd ki a használni kívánt nyelvet.

Ne feledd, hogy néhány probléma az eszköz verziójának a frissítésével is orvosolható (ehhez, olvasd el a felhasználói kézikönyv „Verzió frissítés” című fejezetét).

Ne feledd, hogy mindig minden kérdésre találsz választ a Gyakori kérdések menüpontban / ha megkérdezel más GLOW felhasználókat a Közösségi fórumon / közvetlen kapcsolatba lépsz az NPM-mel a Kapcsolati oldalon vagy az Üzenetek menüpontban, az „Üzenet küldése az Adminnak” gombra kattintva.



### Szerviz

A szerviz szolgáltatásokért forduljon a helyi forgalmazójához

[info@mehrtunde.hu](mailto:info@mehrtunde.hu)


[www.npm-int.com](http://www.npm-int.com)

### FIND US ON



NPM International

 Phone: +36-20-26-876-26

 Whatsapp: +36-20-26-876-26

 Address: 7635 Pécs, Szurdok dűlő 3/E.

Sikeres együttműködést

**Kívánunk neked!**

New Permanent Makeup Ltd.

A dynamic splash of water and milk forms a circular frame around the text. The water is a vibrant blue, while the milk is a creamy white. The background is split into a bright blue top half and a black bottom half.

# NPM

---

## INTERNATIONAL

[www.npm-int.com](http://www.npm-int.com)