


ROVIMED SZÁJMASZK 1 „MEDICARE”

KEZELÉSI, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termék megnevezése: Egészségügyi maszk, többször használható, mosható, autoklávban sterilizálható, konfekcionált, zöld, illetve fehér alapon zöld mintás színben.
Funkció: Levegőszűrőként alkalmazott egyéni védőeszköz, amely az előírt mértékben megakadályozza, hogy kilégzéskor a környezetbe, és belégzéskor a környezetből mikroorganizmusok bekerüljenek a szervezetbe, illetve amely csökkenti a cseppfertőzés veszélyét.
Anyagösszetétel: 100% pamut (orvosi felhasználásra alkalmas, alacsony allergiakockázattal rendelkező technikai textília).
Súly: 180 g/m ²
Szálsűrűség: átlagos pórusméret 200 µm alatti
Kezelési útmutató: 
<ul style="list-style-type: none">• Javasolt mosási hőmérséklet: 60-80°C
<ul style="list-style-type: none">• Maximális mosási hőmérséklet: 90 °C
<ul style="list-style-type: none">• Mosási ciklusszám: maximum 50 mosás
<ul style="list-style-type: none">• Vasalás: 100-200°C-on
<ul style="list-style-type: none">• Centrifugázható és szárítógépben használható
<ul style="list-style-type: none">• Vegyi tisztításra alkalmas
<ul style="list-style-type: none">• Gőzfertőtlenítésre mindkét oldalán alkalmas
<ul style="list-style-type: none">• Sterilizálás autoklávban: MSZ 4209:2011 szabvány szerint (120°C/25 perc)

A maszk egészségügyi célra készült, egyéb irányú felhasználása kizárólag az egyéni légzésvédő készülékre vonatkozó előírások szerint történjék.

A maszk gázok és gőzök ellen nem nyújt védelmet!

Pécs, 2020. március 16.

Irányítási rendszerünk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított.

